



WTR QAC KH SPREY

Kişisel Alanlarda ve Umumi Alanlarda Kullanılan Biyosidal Ürün

WTR QAC KH SPREY NEDİR?

WTR QAC KH SPREY, bakterisit ve fungusit olup yüzey dezenfeksiyonu ve temizliği için kullanılan etkili bir üründür.

KULLANIM ALANLARI

Tıbbi alanda ve tüm alanlarda her türlü yüzeyin dezenfeksiyon ve temizliğinde kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ

Kullanıma hazır bir üründür. Bakterisit ve fungusit etkilidir. Fenol-aldehit içermez. Formülasyonu gereği iyi bir temizleme efekti vardır. Her türlü yüzeyin temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılabilir. Bakteriler üzerinde 5 dakikada, mantarlar üzerinde 15 dakikada etkinlik gösterir. Legionella bakterisine karşı etkindir.

KULLANIM TİPİ

Profesyonel kullanım ve ev dışı kullanıma uygundur.

KULLANIM ŞEKLİ

Uygulama yapılacak yüzeye 30 cm uzaklıktan püskürtülerek tüm alanın ıslanması sağlanır. Etkinlik süresi beklendikten sonra temiz bir bezle silinir.

MİKROBİYOLOJİK ETKİNLİK

NANOLAB Laboratuvarlar Grubu tarafından yapılan analizler sonucunda; Bakteri-17.05.2022 tarihli ve T22-1862 sayılı etkinlik test raporuna göre; S.aureus ATCC 6538; P.aeruginosa ATCC 15442; E.coli ATCC 10536; E.hirae ATCC 10541 suşlarına 5 dk temas süresinde etkindir.

Fungus-17.05.2022 tarihli ve T22-1861 sayılı etkinlik test raporu na göre; C.albicans ATCC 10231; Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 suşlarına 15 dk temas süresinde etkindir.

WTR QAC KH Sprey %7,5 konsantrasyonda 11.04.2011 tarih ve 101/2011 sayılı Chemila raporuna göre bazı virüslere karşı etkindir.

İLGİLİ MEVZUAT BİLGİLERİ

WTR QAC KH SPREY, 03.02.2010 tarihli ve 2010/114 sayılı Biyosidal Ürün Ruhsatı ile üretilmiştir.

İÇERİK

1000 gr WTR QAC KH Sprey 7,5g Didesil Dimetil Amonyum Klorür içerir

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm : Berrak, Sıvı
Koku : Amin Kokulu
pH : 7,5-8,5
Yoğunluk (g/mL,20°C) : 0,97 ± 0,05

SAKLAMA KOŞULLARI

Kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerde saklayın. Güneş ışığına maruz bırakmayınız. Ürün orijinal ambalajında saklanmalıdır. Başka kimyasallarla karıştırmayınız. Ürünün uygulaması yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

RAF ÖMRÜ

Uygun saklama koşulları altında raf ömrü 2 yıldır. Açılmış ürünü 90 gün içerisinde kullanınız.

AMBALAJ

1 L PE şişe sprej başlık ile

UYARILAR

Cilt ve göz ile temasından sakının. Temas halinde; bol suyla yıkayın.

NOT

Daha detaylı bilgi için ürün MSDS'ine bakınız.

BİLGİLENDİRME

Bu dokümanda yer alan bilgiler iyi niyet çerçevesinde verilmiş olup, tüketici tarafından belirtilen şekilde kullanıldığını varsaymaktadır. Ürün kalitesi hakkında emin olmakla birlikte yanlış kullanımdan kaynaklanan durumlar tarafımızdan kabul edilemez.